


#### + Шаг 4 - Включение аппарата

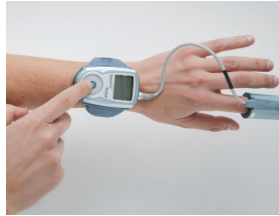

В ночное время: В случае если вам надо будет встать ночью, не снимайте аппарат или датчики.


8. Нажмите синюю кнопку и не отпускайте до тех пор, пока на экране не появится фирменный знак компании «Itamar Medical». В конце короткого теста вы увидите надпись на английском языке: GOOD NIGHT!!! Time elapsed: hours: minutes Recording... , означающую: СПОКОЙНОЙ НОЧИ!!! Истекшее время: часы: минуты Идет запись... Теперь вы можете спокойно засыпать. Примечание: Через минуту экран погаснет. При каждом нажатии на кнопку экран будет загораться на одну минуту. В случае какой-либо проблемы, на экране появится надпись на английском языке: "TEST ABORTED", означающая «ОБСЛЕДОВАНИЕ ПРЕКРАЩЕНО».

#### + Шаг 5 - На следующее утро

- Не пытайтесь выключить аппарат Watch PAT.
- Снимите датчики со своей руки и груди.
- Уложите все детали в футляр аппарата Watch PAT.

#### Watch Over Your Sleep

#### + Обратите внимание

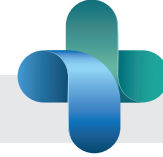

Аппарат Watch PAT не должен вызывать неприятное ощущение или боль. В случае если вы почувствуете неприятное ощущение в кисти руки или в руке, немного ослабьте ремешок.

- Не пытайтесь подключить или отключить какую-либо часть аппарата.
- Не пытайтесь вставить какой-либо посторонний предмет в аппарат.
- Не пытайтесь подключить Watch PAT к электричеству или другому устройству, машине или компьютеру.
- Категорически запрещается самому ремонтировать аппарат

Примечание: Рисунки, приведенные в инструкции, приведены для левой руки. Точно такой же способ применения действителен и для правой руки.


itamar  
medical

МЕДОКСИМА  
ЛЕЧЕБНОЕ И ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ  
МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:  
**Itamar Medical Ltd.**  
9 Halamish St., P.O.Box 3579  
Caesarea Ind. Park  
3088900, Israel  
[www.itamar-medical.com](http://www.itamar-medical.com)  
[info@itamar-medical.com](mailto:info@itamar-medical.com)  
Tel + 972 4 617 7000

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТЕР  
НА ТЕРРИТОРИИ РФ:  
**Компания «Медоксима»**  
Москва, 121596, ул. Горбунова, дом 2  
строение 3, офис В 626  
[www.medoxima.ru](http://www.medoxima.ru)  
[s.lykova@medoxima.ru](mailto:s.lykova@medoxima.ru)  
Тел: +7 (495) 640-86-44 | +7 (929)-559-90-01

REF: OM219332 Edition 2

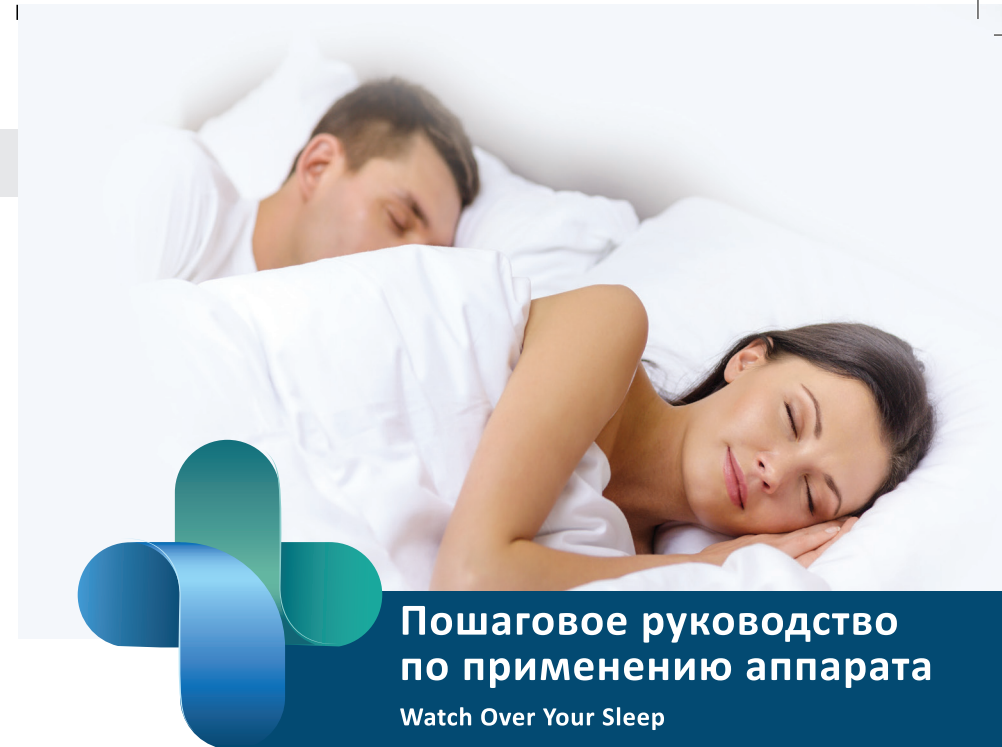

## Пошаговое руководство по применению аппарата

Watch Over Your Sleep

# WatchPAT™

Видеоинструкция по применению:



МЕДОКСИМА  
ЛЕЧЕБНОЕ И ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ  
МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

itamar  
medical | Health Being Made Simple

## WatchPAT<sup>™</sup> 200U

Настоящее руководство поможет вам пользоваться аппаратом Watch PAT у себя дома. Это краткое руководство, которым следует пользоваться после того, как ваш практикующий врач показал вам, как пользоваться этим аппаратом.

*Может потребоваться родительское наблюдение.*

Перед применением Watch PAT

- Снимите прилегающую одежду, кольца, часы и другие ювелирные изделия со своей левой (для правши) руки.
- Проследите за тем, чтобы ноготь указательного пальца был подстрижен.
- Удалите лак для ногтей и искусственные ногти.

Не надевайте аппарат до того, как отправитесь спать.

A - Кнопка вкл. (ON)

B - Датчик храпа и положение тела (опция)

C - Датчик UPAT



В переносной сумке содержится:

- Данное руководство по эксплуатации
- Аппарат с РАТ - Датчиком
- Датчик храпа и положение тела (опция)

### + Шаг 1 - (Опция) Установка датчика храпа и положения тела

**Примечание:** Лучше всего устанавливать датчик храпа и положения тела перед зеркалом.

**Примечание:** Если вы не используете браслет перейдите к шагу 2



1. Протянуть датчик храпа и положения тела через рукав пижамы до открытого участка шеи.



2. Удалить белую пленку с наклейки для датчика.



3. Установить датчик храпа и положения тела на груди точно под яремной ямкой.



4. С помощью медицинского пластыря закрепить датчик храпа и положения тела на данном участке.

### + Шаг 2 - Как устанавливать Watch PAT



5. Установите аппарат на своей левой (для правши) руке. Положите аппарат на плоскую поверхность, вставьте запястье и затяните ремешок. Не затягивайте ремешок слишком туго.



### + Шаг 3 - Применение РАТ-датчика



6. Вставьте указательный палец до конца внутрь датчика.



7. Отделите и постепенно вытащите весь TOP ярлык, нажимая кончиком РАТ-датчика на твердую поверхность.